


# EASYPUMP® II


## LES BONS RÉFLEXES DE MANIPULATION

### REPLISSAGE DU DIFFUSEUR


Le remplissage des diffuseurs portables peut se faire à l'aide d'une seringue à embout Luer Lock en utilisant une technique aseptique. Amorcer la tubulure avec une solution de NaCl 0,9% avant l'ajout du traitement.

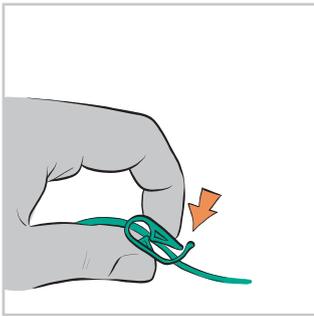


1. Fermer le clamp.

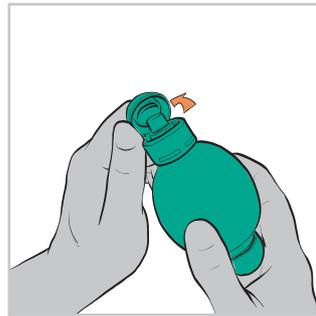


2. Ouvrir le clapet de protection de l'orifice de remplissage.

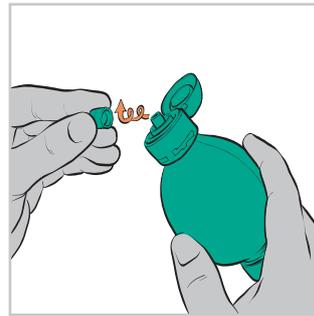


3. Dévisser le bouchon et le déposer sur une surface stérile.

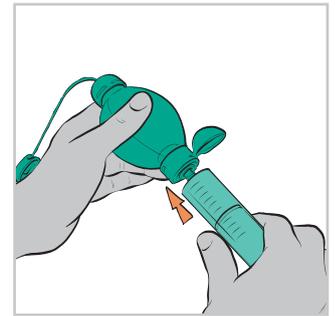


4. Connecter le dispositif de remplissage à l'orifice de remplissage, sans forcer.

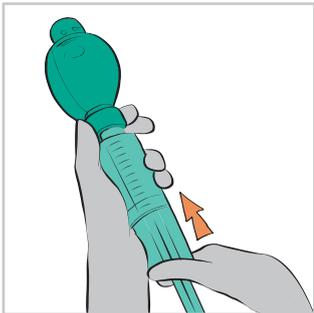


5. Remplir le diffuseur avec approximativement 10 mL de solution de NaCl 0,9%.

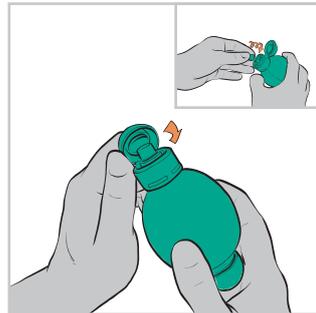


6. Déconnecter le système de remplissage puis revisser le bouchon sur l'orifice et rabattre le clapet de protection.

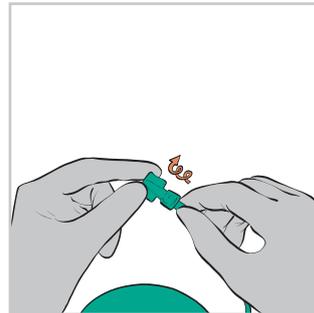


7. Ôter le capuchon de l'embout distal et ouvrir le clamp.

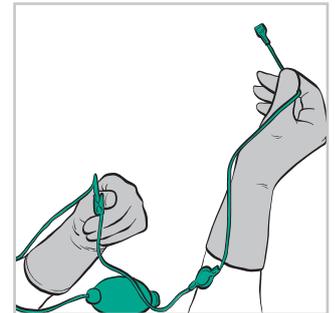

8. S'assurer que le filtre est maintenu vers le haut pendant le processus d'amorçage.

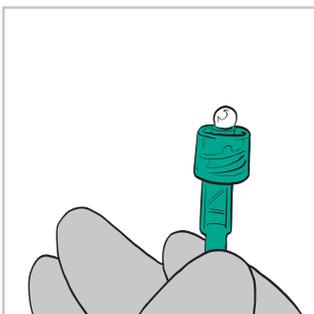

9. La tubulure est purgée lorsque la solution perle au niveau de l'embout distal.

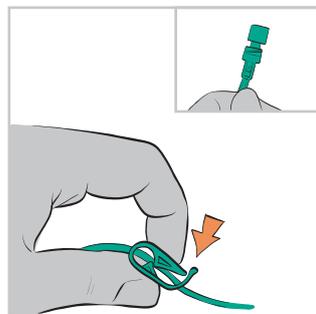


10. Refermer le clamp ainsi que le capuchon de l'extrémité distale.


### AJOUT DE MÉDICAMENT

Se référer systématiquement à la notice fournie par le fabricant de médicament pour connaître les procédures de reconstitution / dilution et de stockage du médicament.


Remplir la seringue de 50 mL avec la solution diluée de médicament et purger l'air de la seringue.

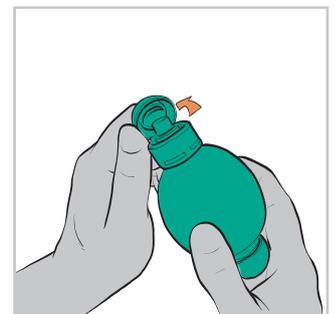


11. Soulever le clapet de protection.

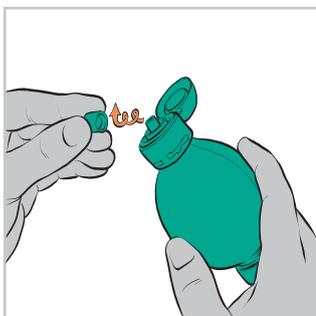


12. Dévisser le bouchon et le déposer sur une surface stérile.

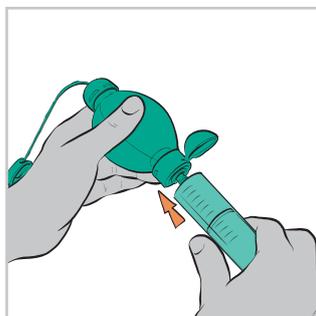

13. Connecter le dispositif de remplissage à l'orifice de remplissage.

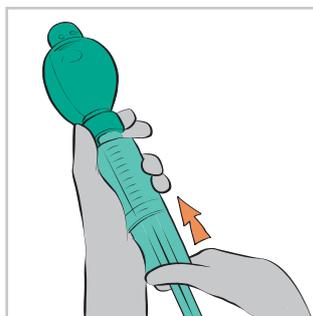


14. Remplir le diffuseur avec la solution médicamenteuse jusqu'à l'obtention du volume souhaité, sans dépasser le volume maximal recommandé.

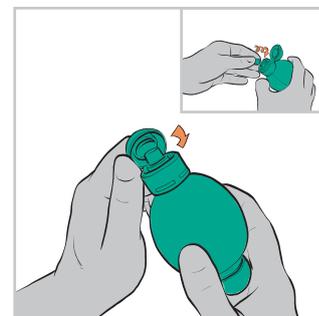


15. Revisser le bouchon sur l'orifice et rabattre le clapet de protection. **Le diffuseur est prêt à être connecté à l'abord vasculaire du patient.**


## CONNEXION & PERFUSION

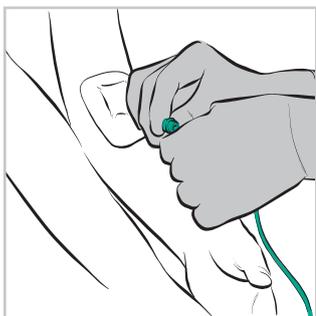


1. Retirer le capuchon de l'embout distal, purger et désinfecter le site d'accès veineux. Raccorder la tubulure au site d'injection.

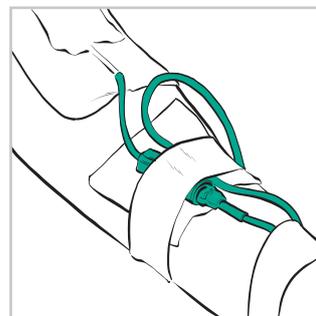

2. Veiller à placer le régulateur de débit au contact de la peau du patient. Le régulateur de débit se situe entre le filtre et l'extrémité distale de la tubulure. vous pouvez le fixer à la peau du patient avec des bandelettes de fixation ou un film de polyuréthane transparent.

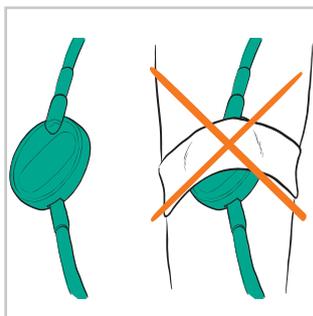

3. Assurez-vous que le filtre d'élimination d'air ne soit pas fixé sur la peau. Il doit rester au sec et n'être recouvert par aucun pansement.

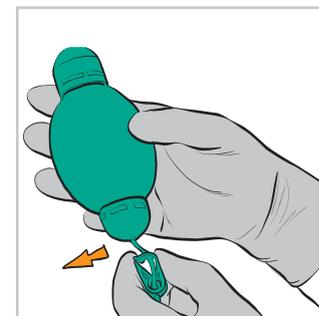

4. Démarrer la perfusion en ouvrant le clamp.

La perfusion est terminée lorsque la membrane élastomérique est revenue à son état initial. Fermer le clamp et débrancher le diffuseur.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document et photo non contractuels. Document réservé aux professionnels de santé.

Easypump® II, est destiné à administrer un traitement par perfusion intraveineuse, sous-cutanée ou péridurale continue (selon le modèle de diffuseur). Dispositif médical de classe IIb. Certificat CE délivré par TÜV SÜD Product Service (0123). Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage avant utilisation.

Fabriqué par :

B. Braun Melsungen AG | Carl-Braun Str. 1 | D-34212 Melsungen | Allemagne

Pour les conditions de prise en charge des dispositifs médicaux utilisés pour la perfusion à domicile dans le cadre des forfaits PERFADOM de la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR), se reporter au site [ameli.fr](http://ameli.fr)

B. Braun Medical | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud  
Tel. +33 1 41 10 53 00 | Fax +33 1 41 10 53 99 | [www.bbraun.fr](http://www.bbraun.fr)  
Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856