


LES BONS RÉFLEXES DE MANIPULATION


Pour la pose

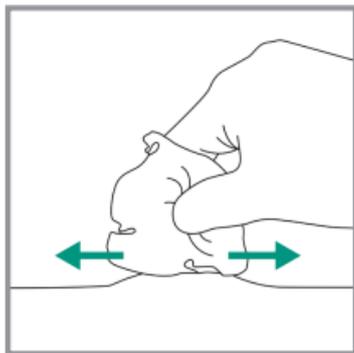


1. Désinfecter la zone de ponction sur le patient



2. Purger l'aiguille à l'aide d'une seringue

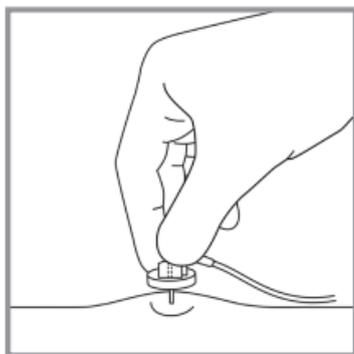


3. Insérer l'aiguille à travers le septum de la chambre

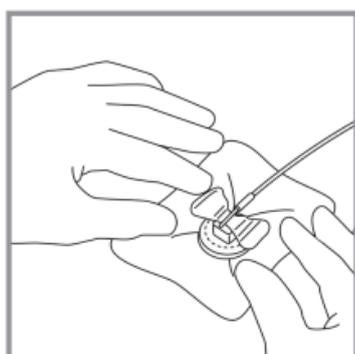


4. S'assurer de la perméabilité et couvrir le site de ponction avec un système de fixation

Se reporter aux référentiels en vigueur et aux notices d'instructions pour l'ensemble des recommandations liées à l'utilisation d'une aiguille de Huber

Pour le retrait

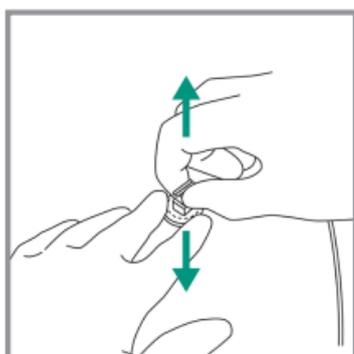

1. Stabiliser la base de l'aiguille avec deux doigts

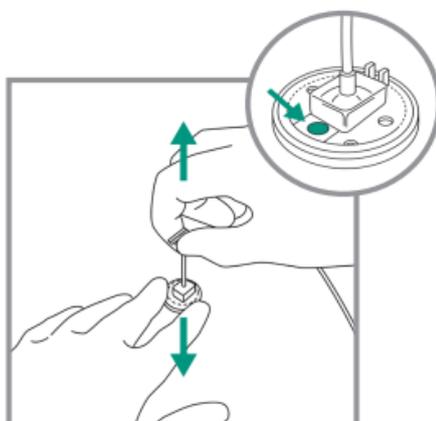

2. Retirer l'aiguille en tirant fermement sur les ailettes jusqu'à entendre un clic et jusqu'à l'apparition du point vert confirmant l'activation de la sécurité

Selon les recommandations de la SF2H, le retrait doit être réalisé tout en exerçant une pression positive

(Prévention des infections associées aux chambres à cathéter implantables pour accès veineux. Recommandations professionnelles par consensus formalisé d'experts, Mars 2012)