


# CATHÉTER COURT PÉRIPHÉRIQUE INTROCAN SAFETY

POSTER DE MANIPULATION

1 PRÉPARER LA POSE DU CATHÉTER

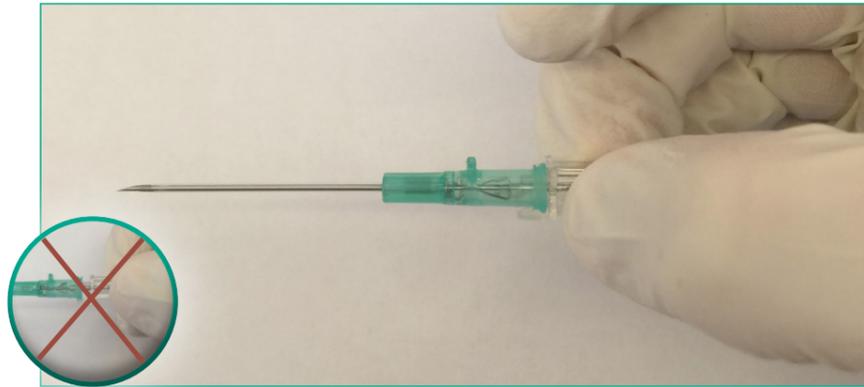

Placer un garrot sur le bras du patient et préparer le site de ponction selon les protocoles en vigueur dans l'établissement.

Saisir la chambre de visualisation du cathéter entre le pouce et le majeur et retirer le capuchon protecteur avec l'index.

Verifier que la chambre de visualisation et l'embase du cathéter ne soient pas désolidarisées.

2 INSÉRER LE CATHÉTER



Piquer selon un angle de ponction adéquat (l'ergot vers le haut indique que le biseau est bien orienté pour piquer).


Observer le reflux sanguin dans la chambre de visualisation du cathéter.

3 BAISSER ET AVANCER LÉGÈREMENT LE CATHÉTER



Abaisser et avancer légèrement l'ensemble cathéter et aiguille pour s'assurer que l'extrémité du cathéter est dans la veine.

4 MONTER LE CATHÉTER

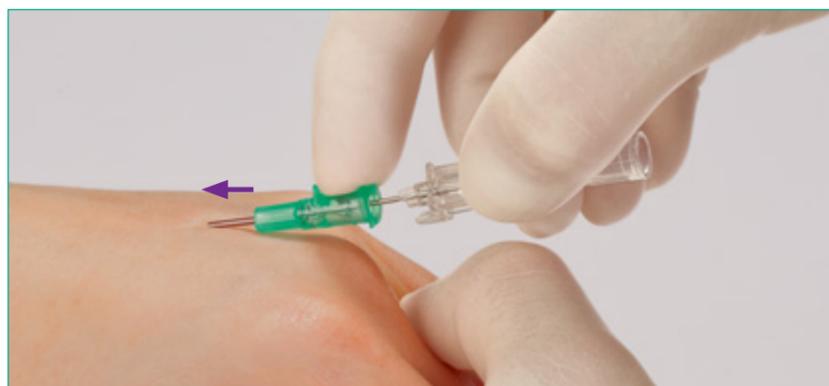

A l'aide de l'ergot, avancer le cathéter sur l'aiguille (environ 3 mm ou 1/8 po.).

Observer le second reflux sanguin entre l'aiguille et la canule pour confirmer que le cathéter est dans la veine.

Après confirmation, continuer à monter le cathéter dans la veine.

5 RETIRER L'AIGUILLE



Placer une compresse entre la peau et le cathéter.

Retirer le garrot, comprimer la veine et maintenir le cathéter avec un doigt sur l'ergot. Retirer l'aiguille (sécurité automatique) et l'éliminer dans un conteneur prévu à cet effet.

6 FIXER LE DISPOSITIF



Raccorder à la tubulure de perfusion et couvrir le site de ponction d'un pansement stérile et transparent selon les protocoles en vigueur dans l'établissement.

Tracer la pose dans le dossier patient (date de pose, type de cathéter, site de pose, opérateur)\*

\* D'après les recommandations de la SF2H "Prévention des infections liées aux cathéters périphériques vasculaires et sous-cutanés" - R16- Mai 2019.

## POUR PASSER COMMANDE



### Introcan® Safety (boîtes de 50 unités)

Taille de gauge	Références sans ailettes PUR	Références avec ailettes PUR	Références sans ailettes FEP	Références avec ailettes FEP	Diamètre ext. (mm)	Longueur (mm)	Débit (ml/mm)
■ 24G	4251607-01	4251614-01	-	-	0,7	14	26
■ 24G	4251601-01	4253523-01	4253500-01	4254503-01	0,7	19	22
■ 22G	4251628-01	4253540-01	4252519-01	4254511-01	0,9	25	35
■ 20G	4251644-01	4253566-01	4252535-01	4254538-01	1,1	32	60
■ 18G	4251687-01	4253604-01	4252560-01	4254562-01	1,3	32	105
■ 18G	4251679-01	4253590-01	4252551-01	4254554-01	1,3	45	100
■ 16G	4251709-01	-	4252586-01	-	1,7	32	215
■ 16G	4251695-01	4253612-01	4252578-01	4254570-01	1,7	50	210
■ 14G	4251717-01	4253639-01	4252594-01	4254597-01	2,2	50	345

Dispositif médical de classe IIa

Introcan Safety® est indiqué pour les prélèvements sanguins, le monitoring de la pression sanguine et l'administration de produits.

Certificat CE délivré par TÜV SÜD (0123)

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage

Produits non pris en charge au titre de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables au titre de l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale)

Fabriqué par B.Braun Melsungen AG | Carl-Braun-Strasse 1 | D-34212 Melsungen

Pictogrammes provenant de FREEPIK

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun.

Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun.

Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Document et photos non contractuels. Document réservé aux professionnels de santé.

Document réservé à l'usage des professionnels de santé

Ref. 301651P\_20191121\_20231121

B. Braun Medical | 26 Rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud

Tel. +33 1 41 10 53 00 | Fax +33 1 41 10 53 99 | www.bbraun.fr

Société par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856